

Informations pour la batterie CPAPextras.com

- Pour l'utiliser avec un cpap, on doit tenir le bouton pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le chiffre sur l'écran clignote. En appuyant à nouveau sur le bouton, on peut modifier le voltage nécessaire. Une fois le choix fait, on attend qu'il cesse de clignoter et on le branche sur le cpap.
 - Pour les appareils de marque ResMed, la batterie doit être placée pour 24V.
 - Pour les appareils de marque Philips, la batterie doit être placée sur 12V.
 - N.B. : la batterie est programmée pour s'éteindre après quelques secondes si pas utilisée, donc on doit démarrer le cpap rapidement après avoir fait les étapes précédentes, sinon, la batterie s'éteindra et il faudra recommencer.
- La batterie doit être utilisée régulièrement (décharge et recharge), car elle n'est pas prévue pour tenir une charge pendant plusieurs semaines.
 - Il faut faire au moins un cycle charge-décharge-recharge au 3-4 mois pour maintenir la capacité de la batterie;
 - Si cela n'est pas fait, ceci éliminera la garantie sur la batterie.
- La batterie peut être utilisée comme source pour recharger tout appareil avec un port usb B ou C. Certains appareils utilisant une recharge sans fil peuvent aussi être compatible.