

Comment installer l'AirTouch F30i Comfort



En tenant le bas du coussin d'une main et le cadre de l'autre, positionnez le masque devant votre visage.



Placez le coussin sous votre nez et assurez-vous qu'il repose bien contre votre visage. Avec le logo Resmed sur le harnais orienté vers le haut, passez le harnais et le cadre par-dessus votre tête.



Passez les sangles inférieures du harnais sous vos oreilles, puis fixez les clips magnétiques* aux connecteurs du cadre.



Défaitez les pattes de fixation des sangles supérieures du harnais, puis tirez uniformément.



Répétez l'étape 4 avec les sangles inférieures du harnais.



Connectez le tuyau d'air de l'appareil au coude du masque.



Pour les personnes aux cheveux plus longs, nous recommandons de faire passer leurs cheveux par l'arrière du harnais, comme illustré. Si les cheveux sont attachés en queue de cheval, la hauteur doit permettre de les faire passer par l'arrière du harnais.

Conçu pour offrir douceur et confort afin d'améliorer l'expérience de sommeil

L'AirTouch F30i Comfort est conçu pour offrir aux patients un confort doux et respirant, dès la première utilisation et jusqu'au dernier moment avant le coucher. Son joint adaptatif est conçu pour rester bien en place lorsque les patients bougent, tandis que la connexion du tube au sommet de la tête leur permet de dormir dans leur position préférée.

La conception silencieuse de la ventilation favorise un environnement plus reposant pour les patients et leurs partenaires, et le masque est conçu pour être facile à porter afin qu'il s'intègre naturellement dans la routine du coucher, aidant ainsi les patients à se sentir à l'aise et confiants dans leur traitement.



Pour commencer, balayez le code QR ou communiquez avec votre représentant commercial chez Resmed.



* Le masque contient des aimants qui peuvent interférer avec certains implants ou dispositifs médicaux. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur pour obtenir des informations complètes sur l'étiquetage, y compris les contre-indications et les avertissements relatifs à l'aimant.

Nous recommandons aux patients de consulter leur clinicien traitant pour tout symptôme clinique ou problème de santé.

¹ Test interne Resmed pour la puissance sonore du masque AirTouch F30i avec événement QuietAir, ID : A5637990

² Test interne Resmed pour les propriétés d'évacuation de l'humidité du tissu, ID : A5498268.

Distribué par Resmed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 É.-U. AdaptiSeal, AirFit, AirTouch, ComfiSoft et QuietAir sont des marques déposées de la famille d'entreprises Resmed. Pour obtenir des informations sur les brevets et autres propriétés intellectuelles, visitez ResMed.com/ip.

© 2025 Resmed. 10114462/1 2025-10

Resmed.com/ATF30i

Douceur au toucher. Confiance à chaque ajustement.

Masque facial intégral
AirTouch™ F30i Comfort de Resmed



Vivez en haute RÉSolution

Conçu pour un confort optimal

L’AirTouch F30i Comfort est conçu pour envelopper les patients dans une douceur absolue grâce à son cadre entièrement recouvert de tissu et à son coussin ComfiSoft™ qui associe un tissu respirant à du silicone souple. Ensemble, ils créent un masque qui procure une sensation de douceur tout autour du visage, tandis que la technologie AdaptiSeal™ s’adapte aux contours du visage pour un ajustement sûr.



Cadre flexible recouvert de tissu
Disponible en trois tailles, le cadre s’adapte facilement à différents profils faciaux et formes de tête pour un ajustement précis dès la première utilisation, ce qui permet de gagner du temps lors de la configuration.


Clips magnétiques*
S’attachent et se détachent facilement pour un ajustement et un retrait aisés.

Coussin facial complet flexible et ultra-compact
Sa flexibilité et sa conception sous le nez réduisent la surface couverte, créant ainsi une sensation de légèreté sur le visage. Disponible en trois tailles et interchangeable avec les modèles AirFit™ F30i et AirFit X30i.

Une innovation exclusive à Resmed
La combinaison de notre coussin innovant en tissu recouvert de silicone ComfiSoft™ et de la technologie AdaptiSeal™ qui épouse les contours du visage sans aucune partie en plastique rigide offre un confort maximal et une étanchéité optimale.



Raccordement du tube au sommet de la tête et coude à retrait rapide
Permet aux patients de dormir dans la position qu’ils souhaitent grâce à une rotation du coude à 360 degrés, tout en leur permettant de connecter et de déconnecter facilement la tubulure de l’appareil.

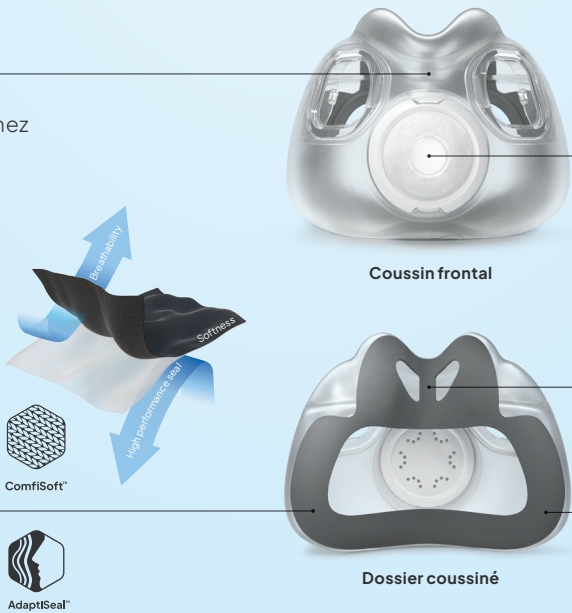

Évent QuietAir™
Avec un niveau sonore de 20 décibels, l’évent silencieux et diffus minimise les perturbations pour les patients et leurs partenaires de lit.¹

Pont de la cloison nasale
Conçu pour maintenir la forme du coussin afin de créer une étanchéité confortable et fiable.

Doux, respirant et évacuant l’humidité
Le tissu doux aide à garder le nez et la bouche au frais et moins moites pour un confort optimal de la peau.²



Système de masque complet

62442
62443
62444
62445
62446

Coussin facial complet ultra-compact
62489
62490
62491

Évent QuietAir

Cadre recouvert de tissu avec coude

Harnais F30i/X30i
63372

Clips magnétiques*
63475

AirTouch™ F30i Comfort

Système de masque complet
(comprend un cadre de masque avec coude, un coussin facial complet et un harnais)

Nom du produit	Code du produit
Système de masque AirTouch F30i Comfort - M/SML	62442
Système de masque AirTouch F30i Comfort - SW/STD	62443
Système de masque AirTouch F30i Comfort - M/STD	62444
Système de masque AirTouch F30i Comfort - L/STD	62445
Système de masque AirTouch F30i Comfort - M/LGE	62446

Harnais
(avec clips magnétiques*)

Nom du produit	Code du produit
Harnais F30i/X30i	63372

Coussin facial complet ultra-compact avec évent QuietAir
(coussin ComfiSoft™ avec technologie AdaptiSeal™)

Nom du produit	Code du produit
Coussin AirTouch F30i - SW	62489
Coussin AirTouch F30i - M	62490
Coussin AirTouch F30i - L	62491

Tailles des coussins
S=Petit | SW=Petit-large | M=Moyen | L=Grand

Tailles des cadres
SML=Petit | STD=Standard | LGE=Grand